


Information sur les produits/ services

DESINFECTANT AU DIALOX 5 Litres

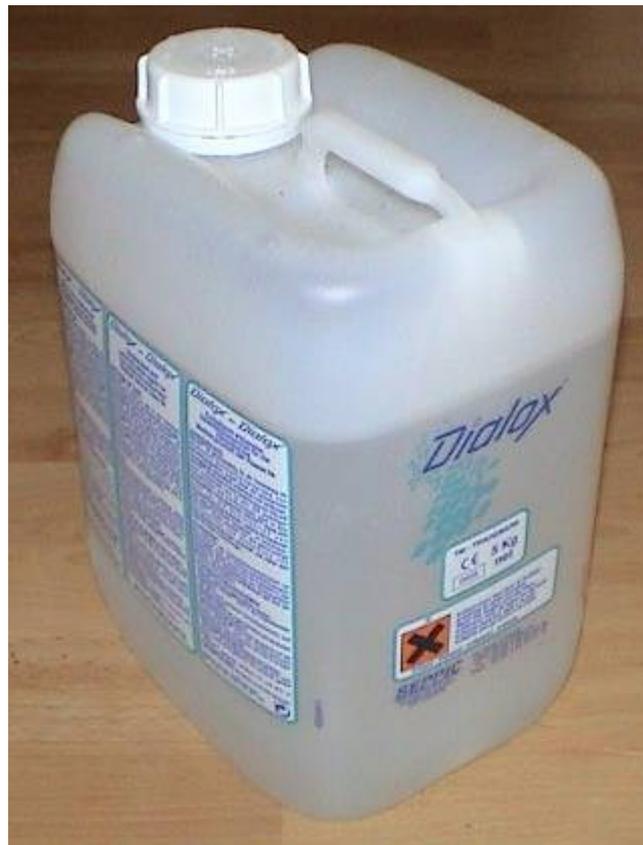

Année 2023

DESINFECTANT AU DIALOX 5 Litres

Produit

- Désinfectant DIALOX

Présentation

- Bidon de 5 Litres avec bouchon hermétique.

Conditionnement

- Carton de 4 bidons de 5 Litres

Applications

- Spécialement approprié pour désinfection et détartrant des dispositifs de traitement d'eau .

Composition du réactif

- Préparation à caractère acide à base de peroxyde diluées dans l'eau.
ACIDE PERACETIQUE < 1% PEROXIDE D'HYDROGENE < 7%

Péremption

- 2 ANS

Mode d'emploi

- Le produit Dialox est prêt à l'emploi, il s'utilise en cycle de désinfection chimique des appareils de traitement d'eau appliqué à l'hémodialyse qui prélève et dilue automatiquement la quantité nécessaire de Dialox .
Dialox est actif dès la dilution de 1/35, et pour un temps de contact de 10mn.

Précautions d'emploi

- Ne pas mélanger DIALOX avec d'autres produits.
- Ne pas remettre de DIALOX usagé dans un bidon .
- Porter gants et lunettes de protections lors des manipulations.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau courante. DIALOX peut provoquer un blanchiment de l'épiderme qui disparaît en quelques heures.
- En cas d'ingestion consulter un spécialiste.
- DIALOX est biodégradable et son rejet à l'égout, dilué fortement, est sans danger .
- Conserver DIALOX sous abri entre 5°C et 30°C .
- Conserver hors de portée des enfants.

Référence : DIALOX 5 L

Conditionnement : 1 Carton de 4 Bidons

* Frais de port et d'emballage gratuit pour une commande sup. à 1000 €.

* Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande.