

Information sur les produits/services

TEST DURETE en bandelettes



Année 2023

TEST DiaQuant® Water Hardness 932005

Produit

DiaQuant® Test de Dureté Résiduelle de l'eau adoucie du laboratoire Macherey-Nagel (réf: 932 005)

Présentation

Boite hermétique avec pastille anti humidité, de 100 bandelettes analytiques.

Conditionnement

Boite unitaire

Applications

Produit avec marquage CE. Spécialement conçu pour la dialyse.
Permet de contrôler très rapidement la dureté de l'eau douce après la phase adoucisseur et avant osmoseur.

Péremption

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

Mode d'emploi

Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 5 secondes.
Eliminer l'excédent de liquide en secouant la languette et attendre 15 secondes.
Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

Précautions d'emploi

Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.
Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

Référence :TEST DIA TH

Veillez nous établir une étude de prix, pour un volume annuel séquencé.

contacter pour

* Frais de port et d'emballage en supplément.