

Information sur les produits/services

***TEST PERACETIQUE***  
***en bandelettes***



Année 2023

# DiaQuant® Test Peracétique 932001

## Produit

DiaQuant® Test peracétique du laboratoire Macherey-Nagel (réf: 932 001)

## Présentation

Boite hermétique avec pastille anti humidité, de 100 bandelettes analytiques.

## Conditionnement

Boite unitaire

## Applications

Produit avec marquage CE. Spécialement conçu pour la dialyse..  
Permet de contrôler très rapidement, les résidus d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène dans les solutions de rinçage, à la suite de désinfection, des matériels de traitement d'eau ou des dialyseurs, avant remise en service.

## Péremption

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

## Mode d'emploi

- ◇ Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 1 secondes.
- ◇ Eliminer l'excédent de liquide en secouant la languette et attendre 5 secondes.
- ◇ Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

## Précautions d'emploi

- ◇ Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.
- ◇ Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

**Référence : TEST DIA PERA**

**Veillez nous établir une étude de prix, pour un volume annuel séquencé.**

**contacter pour**

\* Frais de port et d'emballage en supplément.