

## Information sur les produits/services

### ***TEST PEROXYDE*** *en bandelettes*



Année 2023

# DiaQuant® Test Peroxyde 932002

## **Produit**

DiaQuant® Test peroxyde du laboratoire Macherey-Nagel (réf: 932 002)

## **Présentation**

Boite hermétique avec pastille anti humidité, de 100 bandelettes analytiques.

## **Conditionnement**

Boite unitaire

## **Applications**

Produit avec marquage CE. Spécialement conçu pour la dialyse..  
Permet de contrôler très rapidement, les résidus de peroxyde après rinçage, à la suite de désinfection des matériels de traitement d'eau ou des dialyseurs, avant remise en service.

## **Péremption**

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

## **Mode d'emploi**

- ◇ Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 1 secondes.
- ◇ Eliminer l'excédent de liquide en secouant la languette et attendre 5 secondes.
- ◇ Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

## **Précautions d'emploi**

- ◇ Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.
- ◇ Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

**Référence : TEST DIA PERO**

**Veillez nous contacter pour établir une étude de prix, pour un volume annuel séquencé.**

\* Frais de port et d'emballage en supplément.