



## Information sur les produits/services

### *TEST CHLORE en bandelettes*



Année 2024

Houque 31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE  
Tel: 06.69.19.22.07 Fax: 05.61.90.31.88  
Mail: [contact@danferr-medical.fr](mailto:contact@danferr-medical.fr) Site: [www.danferr-medical.fr](http://www.danferr-medical.fr)



## **DiaQuant® Test Chlorine**

### **Produit**

DiaQuant® Test Chlore du laboratoire Macherey-Nagel ( réf: 932 004)  
0-10 mg/l  
Marquage CE

### **Présentation**

Boite hermétique avec pastille anti humidité, de 100 bandelettes analytiques.

### **Conditionnement**

Boite unitaire

### **Applications**

Produit avec marquage CE. Spécialement conçu pour la dialyse..  
Permet de contrôler très rapidement, les résidus de chlore total après rinçage, à la suite de désinfection des matériels de traitement d'eau ou des dialyseurs, avant remise en service.

### **Péremption**

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

### **Mode d'emploi**

Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 15 secondes.  
Éliminer l'excédent de liquide en secouant la languette.  
Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

### **Précautions d'emploi**

Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.  
Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

**Référence : TEST DIA CHLO**

**Veillez nous contacter pour établir une étude de prix, pour un volume annuel séquencé.**